


## ACCU-CHEK Softclix

### DISPOZITIV PENTRU ÎNȚEPARE

Accu-Chek Softclix este un dispozitiv pentru înțepare special proiectat pentru a permite obținerea unei picături de sânge capilar din vârful degetului sau din lobul urechii, practic fără durere.

Adâncimea de pătrundere a acului poate fi reglată în funcție de diferitele tipuri de piele.

Dispozitivul se folosește numai cu acele speciale, deoarece utilizarea unui alt tip de ac poate defecta dispozitivul.

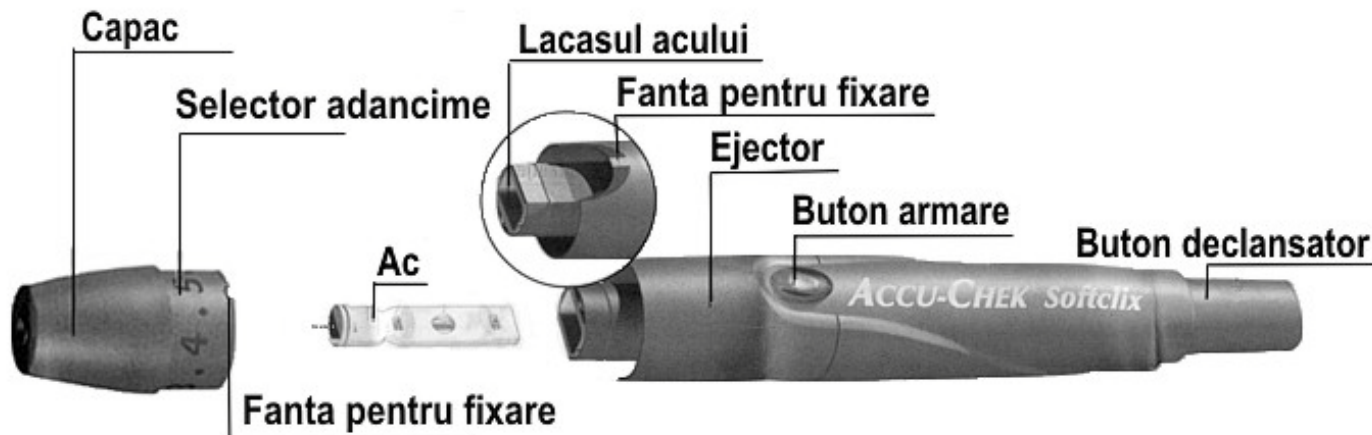

*Dispozitivul de înțepare trebuie utilizat de către o singură persoană, pentru a reduce riscul de infecții.*

Curățați dispozitivul de înțepare săptămânal, folosind o bucată de pânză moale umezită cu apă sau alcool 70%. Curățați și interiorul capacului dispozitivului, folosind un bețișor înfășurat în vată înmuiată în alcool 70%. Lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de a-l folosi.



*Nu introduceți dispozitivul de înțepare în vasul cu apă sau alcool, ci ștergeți-l cu o bucată de pânză, cum s-a arătat mai sus.*

### MODUL DE UTILIZARE

1. Scoateți capacul dispozitivului de înțepare prin tragere.





2. Dacă există deja un ac în dispozitivul de înțepare, eliminați acul, împingând spre înainte segmentul ejector mobil, după cum vedeți în imagine.



*Aruncați cu grijă acele folosite, pentru a evita rănirea accidentală.*


3. Introduceți un ac nou în lăcașul special și împingeți până se fixează.

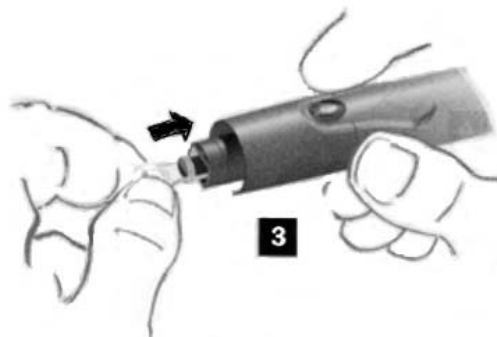

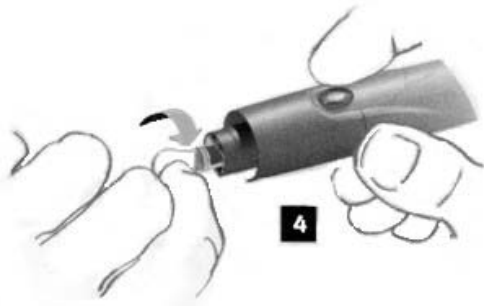

4. Desigilați acul, îndepărtând sigiliul rotund din plastic printr-o mișcare de rotire.

5. Puneți la loc capacul dispozitivului de înțepare, prin apăsare. Introduceți capacul în aceeași poziție în care era atunci când l-ați scos.

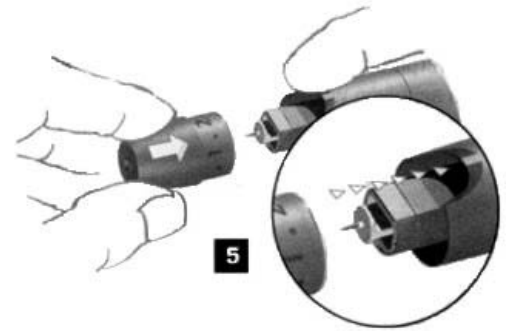

### **PREGĂTIREA PENTRU ÎNȚEPARE**

Cel mai potrivit loc pentru înțepare este lateral, în vârful degetului.


Spălați mâinile cu apă caldă și uscați-le bine. Aceasta asigură o igienă perfectă și stimulează totodată fluxul sanguin.

### **SELECTAREA ADÂNCIMII DE ÎNȚEPARE**

Analizoarele de glicemie moderne folosesc pentru analiză o picătură foarte mică de sânge. Se obține o picătură suficientă chiar prin selectarea unei adâncimi de înțepare reduse.

6. Adâncimea de înțepare se selectează prin rotirea capacului dispozitivului până în dreptul gradației dorite.

Dacă folosiți dispozitivul de înțepare pentru prima dată, alegeți adâncimea 1.

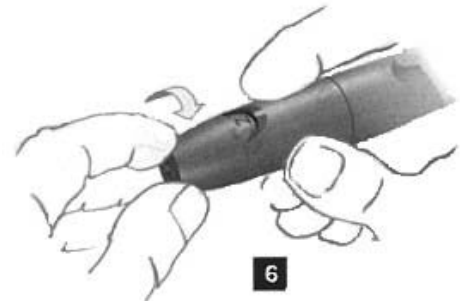


### **OBȚINEREA PICĂTURII DE SÂNGE**

Verificați dacă ați selectat adâncimea de înțepare dorită.



7. Armați dispozitivul de înțepare, apăsând butonul de armare, ca în imagine. Dispozitivul este armat atunci când în butonul pentru declanșare transparent apare un punct galben.

8. Plasați dispozitivul pe deget și apăsați butonul pentru declanșare. Masați ușor degetul pentru a ajuta formarea picăturii de sânge. Dacă nu obțineți suficient sânge, alegeți o adâncime de înțepare mai mare și încercați din nou.

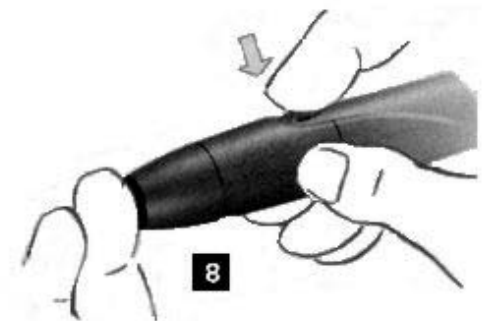

*Folosiți un ac nou pentru fiecare testare, pentru a evita infectarea. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme.*